

キプラスタフイット[®]N

すり傷
きり傷

ピタッと貼れる

伸縮タイプ

透湿

透気

傷口につかない
特殊ネット加工

消毒
殺菌

1サイズ50枚入

第3類医薬品

新素材で、ムレにくく伸びて貼り易い



4 954097 775302

使用期限

ロット番号

第3類医薬品

すり傷
きり傷

1サイズ50枚入

キプラスタフイット[®]N

ピタッと貼れる

伸縮タイプ



靴ずれ



すり傷



きり傷

T11

第3類医薬品



救急絆創膏 販売名：キズプラスターフィットN

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

効能又は効果

切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法及び用量

中央のパッドに触れないようにして剥離紙を取り除き、パッドが傷口に当たるように貼ってください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してください。
- (4) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (5) 貼る際は、引っ張らないで軽く圧着してください。
- (6) ヨードチンキと同時に使用しないでください(アクリノールの殺菌力を弱めます)。

(7) 皮膚の特に弱い人は絆創膏部分を同じ所に続けて貼らないでください。

成分及び分量

パッド100g中 アクリノール水和物 0.8g

添加物として、マクロゴール、メチルセルロース、ガーゼ、ポリエチレンネットを含有します。

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 ☎ 076-479-1313

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

副作用救済制度 ☎ 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元 日本薬剤株式会社

富山市東中野町一丁目1番1号

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山市水橋島等173

1枚(7.0cm×1.9cm)



せり傷



すり傷



靴ずれ

伸縮タイプ

ピタッと貼れる

キズプラスターフィットN

1サイズ50枚入

すり傷
きり傷

第3類医薬品