

救急絆創膏



新素材で水に強い

# きずフィットN

第3類医薬品

カールタイプ



- 水に強い
  - むれない
  - のび～る
- 新素材使用

1サイズ18枚入



株式会社 富山堂薬品



新素材で水に強い

配置期限 ロット番号

品目番号 道18-74-610

第3類  
医薬品

カールタイプ

きずフィットN

△使用上の注意

■

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、  
直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販  
売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

効能又は効果  
切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒・被覆

用法及び用量  
中央のパッドに触れないようにして剥離紙を取り除き、パッドが傷口  
に当たるように貼ってください。

(用法及び用量に関連する注意)

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させて  
ください。
- (3) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないように注意して使用してくだ  
さい。
- (4) 粘着面を患部に貼らないでください。
- (5) 貼る際は、引っ張らないで軽く圧着してください。
- (6) コードンキと同時に使用しないでください。(アクリノールの殺菌  
力を弱めます。)
- (7) 皮膚の特に弱い人は絆創膏部分を同じ所に続けて貼らないでくだ  
さい。

成分及び分量

パッド100箇中 アクリノール水和物 0.8g  
添加物として、マクロゴール、メチルセルロース、ガーゼ、ポリエチレンネット  
を含有します。

(保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管  
してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してくだ  
さい。
- (3) 配置期限を過ぎた製品は使用しないで  
ください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口


電話：076-479-1313

受付時間 9:00～17:00(土日、祝日を除く)

製造販売元  大協薬品工業株式会社

富山市水橋町等173

 紙箱

 外装フィルム

内容 19mm×70mm  
18枚入 ¥380+税

カールタイプ  
新素材使用

# きずフィットN

1サイズ18枚入

第3類医薬品

T11

副作用被害救済制度のお問い合わせ先:(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)