

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

無色殺菌剤配合救急絆創膏

# 新カットバン<sup>®</sup>A 伸縮布

第3類医薬品

- 湯・水仕事にも強い粘着力を示します。
- 伸縮性のあるソフトな布絆創膏でお肌になじみます。
- やわらかな綿包パッドが傷をやさしくまもります。

## ⚠ 【使用上の注意】

### 🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、皮膚はく離

【効能・効果】 切り傷、すり傷、かき傷、靴ずれの創傷面の殺菌消毒および保護

【用法・用量】 ライナーをはぎとりパッドを患部にはってください。

#### 用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部を清潔にし、パッド部分を汚さないよう注意して使用してください。
- (3) 粘着面を患部にはらないでください。
- (4) パッド部分が濡れ、又は汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、はり替えてください。

#### （その他の注意）

使用後はがすときは、患部やまわりの皮膚を傷めないようにゆっくりとはがしてください。  
風呂上がりなど皮膚の表面がやわらかくなっていると思われるときは特にゆっくりとはがしてください。  
使用后、粘着剤が皮膚に残った場合には、はがしたテープの粘着剤面で軽くこすれば取り除けます。

【成分・分量】 パッド 1,000g 中

ベンザルコニウム塩化物……………0.90g

パッド部分：ガーゼ、脱脂綿、添加物としてポリビニルアルコール(完全けん化物)を含有します。

テープ部分：添加物としてBHT、精製ラノリン、エステルガム、酸化亜鉛、脂肪族炭化水素樹脂、

スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、酸化チタン、その他3成分を含有します。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 (L) 25mm×72mm (パッド 19mm×24mm)

(M) 19mm×72mm (パッド 13mm×24mm)

製造販売元

⊕ 祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

日本製

【お客様相談窓口】 TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931