

2025年11月初版

第3類医薬品

強膜レンズ用装着液  
クリアテュー  
**cleadew 装着液**

ご使用前にこの使用説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。  
本品は、強膜レンズ専用の装着液です。強膜レンズの装着時以外には使用しないでください。

**使用上の注意**

**相換すること**

- 1 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
- (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (3) 次の症状のある人 ・ はげしい目の痛み
  - (4) 次の診断を受けた人 ・ 緑内障
- 2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位症状	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

**【効能・効果】**

輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ(強膜レンズ)の装着に用いる

**【用法・用量】**

- ①本液で強膜レンズの両面をすすぐ。
- ②レンズの凹面を本液で濡らし、眼に装着する。

**【用法及び用量に関する注意】**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) キャップ部分を軽く引っ張りながら、ゆっくり回して開封してください。(勢いよく開封すると、薬液が飛び散る場合があります。)
- (3) 湿潤したものや変色したものは使用しないでください。
- (4) 強膜レンズの装着用としてのみ使用してください。
- (5) 容器の先を強膜レンズ、指に触れさせないでください。

**【成分・分量】**

塩化カルシウム:0.13%、塩化ナトリウム:0.74%、ヒプロメロース:0.1%  
添加物として、無水リン酸二水素ナトリウム、無水リン酸一水素ナトリウム、精製ヒアルロン酸ナトリウム、pH調節剤を含有する。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 薬液を他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる恐れがあります。)
- (4) 1本を他の人と共用しないでください。
- (5) 使用後に薬液が残っていても、再使用しないでください。
- (6) 使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても一度容器を開封した後はすみやかに使用してください。
- (7) 本剤を携帯する際、スポンの後ろのポケット等に入れないでください。  
(キャップ部分が折れて開いてしまう恐れがあります。)

**【コンタクトレンズ使用時の注意】**

- (1) コンタクトレンズを取扱う前に、よく手を洗い清潔にしてください。
- (2) コンタクトレンズを清潔に、また、正常に保つために保存、消毒、洗浄については十分心がけてください。
- (3) 眼科医による定期検査を必ず受けてください。

**【製造販売元】**

株式会社 **オフテクス**

神戸市中央区港島南町5-2-4  
[www.ophtecs.co.jp](http://www.ophtecs.co.jp)

オフテクスお客様相談センター ☎0120-021094

受付:月~金(祝日は除く) 9:00~17:00

箱の内側に使用説明書がございます。  
よく読んでからお使いください。